

Preguntas frecuentes sobre iOS

¿Qué dispositivos iOS son compatibles con CamAPS FX?

- iPhones con un sistema operativo de 17 o superior.
- La aplicación actualmente no es compatible con iPads, relojes Apple o Apple CarPlay.

¿Qué bombas de insulina son compatibles con la aplicación para iOS?

- La app CamAPS FX la podrán utilizar los usuarios de iPhone con una bomba mylife YpsoPump compatible.

¿Qué sensores de glucosa son compatibles con la aplicación para iOS?

- Los usuarios de iPhone con una bomba mylife YpsoPump compatible pueden enlazarla con un sensor Dexcom G6, FreeStyle Libre 3 o FreeStyle Libre 3 Plus.
- La compatibilidad con el sensor Dexcom G7 estará disponible más adelante.

¿Qué funciones de CamAPS FX están disponibles con la aplicación para iOS?

- El algoritmo y la funcionalidad de la aplicación son idénticos, tanto en la aplicación para Android como para iOS, por ejemplo:
 - Modos “Boost” e “Ease-off”
 - Objetivo de glucosa personal
 - Calculadora de bolos y Agregar comida
 - Alertas personalizables (tenga en cuenta: si el iPhone está en modo de concentración o silencioso, todas las alertas, incluidas la de Baja urgente, se pueden silenciar a menos que se excluya la aplicación)

¿Qué funciones de intercambio de datos están disponibles con la aplicación para iOS?

- La aplicación para iOS puede transmitir automáticamente los datos a Glooko, Glooko XT y generar un informe PDF de 2 semanas, que se podrá enviar por correo electrónico desde la aplicación. mylife Cloud estará disponible próximamente.
- Los padres o tutores podrán vigilar a distancia en su propio smartphone Android a los usuarios de la aplicación para iOS por medio de Companion.
- La función Companion en la aplicación para iOS estará disponible próximamente.

Nota: Tenga en cuenta que **NO** se conservará el aprendizaje del algoritmo al cambiar de un dispositivo Android a uno con iOS y viceversa.
