

Časté dotazy k iOS

Jaká zařízení iOS jsou s aplikací CamAPS FX kompatibilní?

- Telefony iPhone s operačním systémem 17 a novějším.
- Pokud je k dispozici nový operační systém (např. OS26), doporučuje se uživatelům neaktualizovat svůj telefon, dokud aplikace i výrobce senzoru nepotvrdí kompatibilitu.
- Zvažte vypnutí automatických aktualizací operačního systému v nastavení svého telefonu.
- Aplikace zatím není kompatibilní se zařízeními iPad, hodinkami Apple ani systémem Apple CarPlay.

Jaké inzulinové pumpy jsou s aplikací pro iOS kompatibilní?

- Aplikaci CamAPS FX budou moci používat uživatelé telefonů iPhone s kompatibilní pumpou mylife YpsoPump.

Jaké senzory glukózy jsou s aplikací pro iOS kompatibilní?

- Uživatelé telefonů iPhone s kompatibilní pumpou mylife YpsoPump mohou aplikaci propojit se senzorem Dexcom G6.
- Následovat bude ještě možnost propojení se senzorem Dexcom G7.

Jaké funkce CamAPS FX jsou v aplikaci pro iOS dostupné?

- Algoritmus a funkce aplikace jsou v aplikaci pro Android i v aplikaci pro iOS stejné:
 - Režim „Boost“ a „Ease-off“
 - Osobní cílová glykémie
 - Bolusový kalkulátor a funkce Přidat jídlo
 - Přizpůsobitelná upozornění a varování (pokud je iPhone v režimu soustředění nebo v tichém režimu, mohou být ztlumena všechna upozornění včetně urgentního upozornění na nízkou hladinu, jestliže pro aplikaci nenastavíte výjimku)

Jaké možnosti sdílení dat jsou v aplikaci pro iOS dostupné?

- Aplikace pro iOS může automaticky odesílat data do Glooko a mylife Cloud, pokud je udělen souhlas a aplikace je správně propojena v nabídce „Sdílení“.
- V nabídce „Statistiky“ můžete také vygenerovat 2týdenní zprávu v PDF, kterou lze odeslat e-mailem přímo z telefonu.
- Funkce iOS Companion umožňuje uživatelům iPhone zobrazovat údaje o glykémii a inzulinu, stejně jako upozornění od osoby, která používá aplikaci CamAPS FX pro Android nebo iOS.
- V aplikaci pro iOS není k dispozici funkce upozornění prostřednictvím SMS.

Upozornění: Učení algoritmu se při přechodu ze zařízení Android na zařízení iOS a naopak NEZACHOVÁ.

Přejděte z aplikace CamAPS FX pro Android na aplikaci CamAPS FX pro iOS s podporou vašeho diabetologického týmu.