

iOS veelgestelde vragen

Welke iOS-apparaten zijn compatibel met CamAPS FX?

- iPhones met een besturingssysteem van 17 en hoger.
- Als er een nieuw besturingssysteem beschikbaar komt (bijv. OS26), wordt gebruikers aangeraden hun telefoon niet te updaten totdat zowel de app als de sensorfabrikant de compatibiliteit hebben bevestigd.
- Overweeg om automatische updates van het besturingssysteem in de instellingen van uw telefoon uit te schakelen.
- Op dit moment is de app niet compatibel met iPads, Apple watches of Apple CarPlay.

Welke insulinepompen zijn compatibel met de iOS-app?

- iPhone-gebruikers met een compatibele mylife YpsoPump kunnen de CamAPS FX-app gebruiken.

Welke glucosesensoren zijn compatibel met de iOS-app?

- iPhone-gebruikers met een compatibele mylife YpsoPump kunnen koppelen met een: Dexcom G6, FreeStyle Libre 3 of FreeStyle Libre 3 Plus sensor.
- Beschikbaarheid voor de Dexcom G7 sensor volgt later.

Welke CamAPS FX-functies zijn beschikbaar met de iOS-app?

- Het algoritme en de functies van de app zijn voor zowel de Android- als de iOS-app hetzelfde, namelijk:
 - Modi "Boost" en "Ease-off"
 - Persoonlijke glucosedoelwaarde
 - Boluscalculator en Maaltijd toevoegen
 - Aanpasbare alarmen (let op: als de iPhone in focus of stille modus staat, worden alle alarmen, inclusief dringend laag, mogelijk gedempt, tenzij de app is uitgezonderd)

Welke opties voor het delen van gegevens zijn beschikbaar met de iOS-app?

- De iOS-app kan automatisch gegevens doorsturen naar Glooko en mylife Cloud, mits toestemming is gegeven en de app correct is gekoppeld in het menu "Delen".
- In het menu "Statistieken" kunt u ook een PDF-rapport van 2 weken genereren, dat via e-mail vanaf de telefoon kan worden verzonden.
- De iOS Companion-functionaliteit maakt het voor iPhone-gebruikers mogelijk om glucose- en insulinegegevens evenals meldingen te bekijken van iemand die de CamAPS FX-app op Android of iOS gebruikt.
- In de iOS-app is geen SMS-meldingsfunctie beschikbaar.

Opmerking: Let op dat wat het algoritme geleerd heeft NIET behouden blijft wanneer u wisselt van een Android- naar een iOS-apparaat en vice versa.

Schakel over van de CamAPS FX-app voor Android naar de iOS-versie met de ondersteuning van uw diabetesteam.
