

iOS — często zadawane pytania

Jakie urządzenia oparte o system iOS są zgodne z aplikacją CamAPS FX?

- Smartfony iPhone z systemem operacyjnym w wersji 17 lub nowszej.
- Jeśli zostanie udostępniony nowy system operacyjny (np. OS26), zaleca się użytkownikom, aby nie aktualizowali swojego telefonu, dopóki zarówno aplikacja, jak i producent sensora nie potwierdzą kompatybilności.
- Proszę rozważyć wyłączenie automatycznych aktualizacji systemu operacyjnego w ustawieniach telefonu.
- Aplikacja nie jest obecnie zgodna z urządzeniami iPad, zegarkami Apple Watch ani aplikacją Apple CarPlay.

Jakie pompy insulinowe są zgodne z aplikacją w wersji na system iOS?

- Z aplikacji CamAPS FX będą mogli korzystać użytkownicy smartfonów iPhone ze zgodną pompą mylife YpsoPump.

Jakie czujniki glukozy są zgodne z aplikacją w wersji na system iOS?

- Użytkownicy smartfonów iPhone ze zgodną pompą mylife YpsoPump mogą korzystać z czujników: Dexcom G6.
- Możliwość połączenia z czujnikiem Dexcom G7 zostanie wprowadzona na rynek w późniejszym terminie.

Jakie funkcje aplikacji CamAPS FX są dostępne w wersji na system iOS?

- Algorytm i funkcje aplikacji są takie same, zarówno w wersji na system Android, jak i system iOS, czyli:
 - Tryby „Boost” i „Ease-off”
 - Osobista wartość docelowa glikemii
 - Kalkulator bolusa i dodawanie posiłków
 - Spersonalizowane alerty (uwaga: jeśli smartfon iPhone jest w trybie skupienia lub cichym, wszystkie alerty, w tym pilny alert o niskim poziomie glukozy, mogą być wyciszone do czasu wykluczenia aplikacji)

Jakie opcje udostępniania danych są dostępne w wersji na system iOS?

- Aplikacja iOS może automatycznie przysyłać dane do Glooko i mylife Cloud, jeśli wyrażono na to zgodę i aplikacja jest poprawnie powiązana w menu „Udostępnianie”.
- W menu „Statystyki” można również wygenerować 2-tygodniowy raport PDF, który można wysłać e-mailem z telefonu.
- Funkcja iOS Companion umożliwia użytkownikom iPhone’a przeglądanie danych dotyczących glukozy i insuliny, a także alertów od osoby korzystającej z aplikacji CamAPS FX na Androidzie lub iOS.
- W aplikacji iOS nie jest dostępna funkcja alertów SMS.

Uwaga: należy mieć świadomość, że efekty uczenia algorytmu NIE zostaną zachowane podczas przejścia z urządzenia z systemem Android na urządzenie z systemem iOS i odwrotnie.

Przejdź z aplikacji CamAPS FX na Androida do wersji na iOS przy wsparciu swojego zespołu diabetologicznego.
