

# Vanliga frågor om iOS

## Vilka iOS-enheter är kompatibla med CamAPS FX?

- iPhone med operativsystem version 17 och högre.
- Om ett nytt operativsystem blir tillgängligt (t.ex. OS26), rekommenderas användarna att inte uppdatera sin telefon förrän både appen och sensortillverkaren har bekräftat kompatibiliteten.
- Överväg att inaktivera automatiska uppdateringar av operativsystemet i telefonens inställningar.
- Appen är för närvarande inte kompatibel med iPad, Apple-klockor eller Apple CarPlay.

## Vilka insulinpumpar är kompatibla med iOS-appen?

- iPhone-användare med en kompatibel mylife YpsoPump kommer att kunna använda appen CamAPS FX.

## Vilka glukossensorer är kompatibla med iOS-appen?

- iPhone-användare med en kompatibel mylife YpsoPump kan länka till en Dexcom G6-sensor, FreeStyle Libre 3-sensor eller FreeStyle Libre 3 plus-sensor.
- Utförande för sensorn Dexcom G7 kommer senare.

## Vilka funktioner i CamAPS FX är tillgängliga i iOS-appen?

- Algoritmen och appen fungerar på samma sätt i apparna för Android och iOS, nämligen
  - "Boost" och "Ease-off"
  - Personligt målglukosvärde
  - Boluskalkylator och Lägg till måltid
  - Anpassade varningar (observera att om iPhone är i fokus eller tyst läge kan alla varningar, inklusive akut lågt, vara tysta om inte appen är utesluten)

## Vilka datadelningsalternativ är tillgängliga i iOS-appen?

- iOS-appen kan automatiskt överföra data till Glooko och mylife Cloud, om samtycke har givits och appen är korrekt länkad i menyn "Dela".
- I menyn "Statistik" kan du också generera en 2-veckors PDF-rapport som kan skickas via e-post från telefonen.
- iOS Companion-funktionen gör det möjligt för iPhone-användare att se glukos- och insulindata samt aviseringar från någon som använder CamAPS FX-appen på Android eller iOS.
- Det finns ingen SMS-aviseringstillgänglighet i iOS-appen.

**OBS! Observera att algoritminläringen INTE kommer att sparas vid byte från en Android-till en iOS-enhet och vice versa.**

Byt från CamAPS FX-appen för Android till iOS-versionen med stöd av ditt diabetesteam.