

iOS: Foire aux questions

Quels sont les dispositifs fonctionnant sous iOS compatibles avec CamAPS FX?

- Les iPhones utilisant un système d'exploitation de version 17 et ultérieures.
- Si un nouveau système d'exploitation est mis à disposition (par ex. OS26), il est recommandé aux utilisateurs de ne pas mettre à jour leur téléphone tant que l'application ainsi que le fabricant du capteur n'ont pas confirmé la compatibilité.
- Les mises à jour automatiques des systèmes d'exploitation peuvent être activées par défaut dans les paramètres de votre téléphone, veuillez les désactiver.
- À ce jour l'application n'est pas compatible avec les iPads, les montres connectées Apple (Apple watch) ou l'Apple CarPlay.

Quelles sont les pompes à insuline compatibles avec l'application pour iOS?

- L'application CamAPS FX pour iOS est destinée aux utilisateurs d'iPhone disposant d'une pompe mylife YpsoPump compatible.

Quels sont les capteurs de glucose compatibles avec l'application pour iOS?

- L'application pour iOS est compatible avec les capteurs de glucose Dexcom G6 et FreeStyle Libre 3 d'Abbott.
- La disponibilité du capteur Dexcom G7 suivra.

Quelles sont les fonctionnalités de CamAPS FX disponibles avec l'application pour iOS?

- Les fonctionnalités de l'algorithme et de l'application sont les mêmes que ce soit pour Android et pour iOS, à savoir:
 - Modes « Boost » et « Ease-off »
 - Cible personnalisée de glucose
 - Calculateur de suggestions de bolus (assistant bolus) et fonction Ajouter un repas
 - Alertes personnalisables (**à noter:** si l'iPhone est en mode concentration ou silence, toutes les alertes, y compris l'alarme de glycémie très basse, peuvent être désactivées, sauf si l'application est exclue dans le menu Réglages « Concentration »)

Quelles sont les options de partage des données disponibles avec l'application pour iOS?

- L'application iOS peut transmettre automatiquement des données à Glooko XT et à mylife Cloud, si le consentement est donné et si l'application est correctement liée dans le menu « Partager ».
- Dans le menu « Statistiques », vous pouvez également générer un rapport PDF de 2 semaines, qui peut être envoyé par e-mail depuis le téléphone.
- La fonctionnalité iOS Companion permet aux utilisateurs d'iPhone de consulter les données de glucose et d'insuline ainsi que les alertes d'une personne utilisant l'application CamAPS FX sur Android ou iOS.
- La fonctionnalité d'alertes par SMS n'est pas disponible dans l'application iOS.

À noter: Veuillez garder à l'esprit que l'apprentissage de l'algorithme NE sera PAS conservé lors du passage d'un dispositif sous Android vers un dispositif sous iOS et inversement.

Passez de l'application CamAPS FX pour Android à celle pour iOS avec le soutien de votre équipe diabétologique.