

PRIMEROS PASOS CON GLOOKO® Y CÓMO CARGAR DATOS



PRIMEROS PASOS CON GLOOKO®

Hay dos maneras preferidas de iniciar Glooko:

1. Activar una cuenta creada por su profesional sanitario. Al activar su cuenta clínica, podrá ver y cargar datos desde su domicilio.
2. Crear una cuenta en su domicilio y conectarla con la clínica con el código ProConnect de esta.

NOTA: Para evitar cuentas duplicadas, no cree una cuenta desde su domicilio si su profesional sanitario ya le creó una cuenta en la clínica.

1. Cómo activar una cuenta de paciente creada por su profesional sanitario

La cuenta se puede activar de dos maneras:

- 1a. Al recibir una invitación del profesional sanitario por correo electrónico. En ese caso, debe hacer clic en **el botón Activar cuenta** y seguir las indicaciones en pantalla para activar su cuenta.
- 1b. Como alternativa, la clínica puede compartir con usted un PDF impreso con sus informes en el que se proporciona un código QR único. Para activar su cuenta, escanee el código QR de la portada y siga las instrucciones en pantalla.



2. Cómo crear una cuenta de paciente desde el domicilio

Antes de crear una cuenta, asegúrese de que el profesional sanitario no haya creado una a su nombre. Se puede crear una cuenta de Glooko® en la web o con la Glooko® Mobile App en el móvil.

- 2a. En Internet, visite join.glooko.com. Cree la cuenta e introduzca su nombre completo, el correo electrónico, la fecha de nacimiento, el país, un número de teléfono móvil (opcional), etc.

- 2b. Para registrarse con la aplicación móvil de Glooko®, deberá seguir los mismos pasos que para crear la cuenta desde su ordenador. Escanee el código QR a la derecha o descargue la aplicación desde Google Play/App Store.



NOTA: Para los menores de edad se requiere el consentimiento de los padres.

VER DATOS

Para ver los datos, inicie sesión en my.glooko.com a través de un móvil o un ordenador.

COMPARTIR DATOS

Si crea la cuenta usted solo, puede compartir datos con la clínica añadiendo el código ProConnect de esta. Este código es único para su clínica.

El **código ProConnect** se introduce en la **página Configuración** en la **pestaña Cuenta**.

Código ProConnect de mi clínica: _____



Como paciente, puede compartir su cuenta con varias clínicas. También puede introducir el código ProConnect en la aplicación móvil.

Si ha recibido una invitación de su profesional sanitario por correo electrónico, el código ProConnect ya estará introducido.

CARGAR DATOS

CONECTAR SUS DISPOSITIVOS A SU SMARTPHONE.

1. Para configurar su glucómetro vaya al **Menú de sincronización** (esquina superior derecha de la pantalla de inicio).
2. Pulse **Añadir nuevo dispositivo** (iOS) o **Añadir dispositivo** (Android).
3. Seleccione el dispositivo adecuado (glucómetro, monitor continuo de glucosa, pluma inteligente, aplicación conectada o dispositivo de forma física y salud).
4. Seleccione su dispositivo de la lista y pulse **Añadir**.



CARGAR UN DISPOSITIVO EN LA APLICACIÓN MÓVIL


1. En la pantalla de inicio, pulse **Sincronizar dispositivo**.
2. Seleccione su dispositivo y, a continuación, siga las instrucciones de la pantalla para sincronizarlo y cargar sus datos.

Si es necesario que utilice otro método para cargar sus datos, la Glooko® Mobile App se lo hará saber y le dará las instrucciones pertinentes.



CONECTAR APLICACIONES DESDE SU ORDENADOR

1. Para configurar la conexión con aplicaciones externas, vaya a la **página Configuración** de su cuenta de Glooko®.
2. En la **página de configuración**, si va a la **sección Aplicaciones y dispositivos**, podrá conectar aplicaciones de diabetes y de salud.

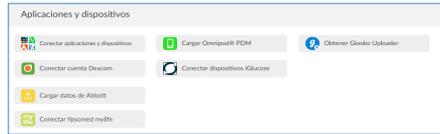

3. Seleccione la aplicación adecuada e introduzca sus credenciales de inicio de sesión para que la aplicación seleccionada cree la conexión.

GLOOKO® UPLOADER

1. Haga clic en **Obtener Glooko® Uploader** en la **sección Aplicaciones y dispositivos** de la **página Configuración** en su cuenta de Glooko®.



2. Descargue la aplicación para Mac/PC y siga las instrucciones de instalación.
- 3a. Empiece a usar Glooko Uploader® haciendo doble clic en el icono de su ordenador.
 - b. Inicie sesión en su cuenta de Glooko®.
 - c. Cuando haya conectado el cable a su ordenador, conecte el dispositivo de diabetes al cable. Glooko Uploader® lo buscará automáticamente.
 - d. A continuación, cargue los datos en Glooko®.
 - e. Glooko® Uploader le notificará cuando haya finalizado la carga.



Puede encontrar más recursos disponibles en
support.glooko.com

glooko[®]
BETTER TOGETHER

MKTG-0119-ES-es 03