

AAN DE SLAG MET GLOOKO® EN GEGEVENS UPLOADEN



AAN DE SLAG MET GLOOKO®

Er zijn twee voorkeursmanieren om aan de slag te gaan met Glooko:


1. Activeer een account dat is aangemaakt door uw zorgverlener. Door uw ziekenhuisaccount te activeren kunt u thuis gegevens bekijken en uploaden.
2. Maak thuis een account aan en maak vervolgens verbinding met het ziekenhuis met de ProConnect-code van het ziekenhuis.

LET OP: Om dubbele accounts te voorkomen, moet u thuis geen account aanmaken als uw zorgverlener al een Clinic-account heeft aangemaakt voor u.

1. Een patiëntenaccount activeren dat is gemaakt door uw zorgverlener

Een account kan op twee manieren worden geactiveerd:

- 1a. Via een e-mail met een uitnodiging van uw zorgverlener. In dat geval moet u op de **knop Account activeren** klikken en de aanwijzingen op het scherm volgen om uw account te activeren.

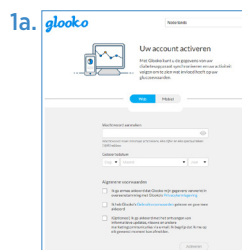

- 1b. Uw ziekenhuis kan u ook een gedrukte pdf geven van uw rapporten met een unieke QR-code. U kunt uw account activeren door de QR-code op het voorblad te scannen en de instructies op het scherm te volgen.



2. Een patiëntenaccount maken vanuit huis

Controleer voordat u een account maakt of uw zorgverlener er een op uw naam heeft gemaakt. Het is mogelijk om een Glooko®-account aan te maken via de website of met de Glooko® Mobile App.

- 2a. Ga naar **join.glooko.com**. U maakt een account door uw naam, e-mailadres, geboortedatum, land en (eventueel) telefoonnummer, etc. op te geven.
- 2b. Bij het maken van een account via de Glooko® Mobile App volgt u dezelfde stappen als bij het maken van een account op uw pc. Scan de QR-code rechts of download de app via Google Play of de App Store.



LET OP: Minderjarigen hebben de toestemming van hun ouders nodig.

GEGEVENS RAADPLEGEN

Om uw gegevens te raadplegen meldt u zich aan op my.glooko.com op een mobiel apparaat of op een pc.

GEGEVENS DELEN

Indien u zelf uw account maakt, kunt u gegevens delen met uw ziekenhuis door de ProConnect-code van het ziekenhuis in te voeren. Deze code is uniek voor uw kliniek.

De **ProConnect-code** wordt toegevoegd op de **pagina Instellingen** onder het **tabblad Account**.

De **ProConnect-code** van mijn ziekenhuis: _____

Als patiënt kunt u uw patiëntenaccount delen met meerdere ziekenhuizen. De ProConnect-code van uw ziekenhuis kan ook worden toegevoegd via de Glooko® Mobile App.

Als u per e-mail een uitnodiging hebt ontvangen van uw ziekenhuis, is de ProConnect-code al ingevuld.

Account

E-mailadres: johndoe@gmail.com Wachtwoord: ***** Taal: Nederlands

ProConnect-code

• Primaire zorgverlener

+ Nieuwe code toevoegen

GEGEVENS UPLOADEN

UW APPARATEN VERBINDEN MET UW SMARTPHONE

1. U kunt uw glucosemeter instellen via het **menu Sync** (rechterbovenhoek in het startscherm)
2. Tik op **Nieuw apparaat toevoegen** (iOS) of **Apparaat toevoegen** (Android).
3. Selecteer het juiste apparaat (Bloedglucosemeters, Continue glucosemonitor, Smartpennen, Verbonden apps of Fitness- en gezondheidsapparaten).
4. Selecteer uw meter uit de lijst en tik op **Toevoegen**.



EEN APPARAAT UPLOADEN IN DE MOBIELE APP

1. Op het startscherm tikt u op **Uw apparaat synchroniseren**.
2. Selecteer uw apparaat en volg de instructies op het scherm om uw apparaat te synchroniseren en uw gegevens te uploaden.

De Glooko® Mobile App informeert u en geeft u instructies als u een andere methode moet gebruiken om uw gegevens te uploaden.

Synchroniseren

Hulp nodig? Bezoek ons ondersteuningscentrum

Uw apparaten


Nieuw apparaat toevoegen

Tandem t:slim X2
Laatste synchronisatie: jun. 13, 2022
307285
Apparaat synchroniseren

Insulet Omnipod Dash® System
Laatste synchronisatie: jun. 9, 2022
010000-01011
Apparaat synchroniseren


DE APPS KOPPELEN VIA UW PC

1. U kunt uw verbinding met externe apps instellen door naar de **Instellingenpagina** te gaan in uw Glooko®-account.
2. In de **Instellingenpagina** scrollt u door naar het **tabblad Apps en apparaten** waarin u de mogelijkheid hebt om een verbinding te maken met de Diabetes & Health-apps.
3. Selecteer de juiste app en ga door met uw identificatiegegevens voor de geselecteerde app om een verbinding tot stand te brengen.

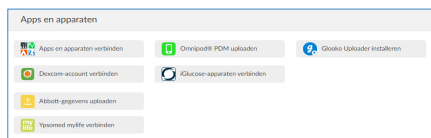

GLOOKO® UPLOADER

1. Klik op **Glooko® Uploader downloaden** in het **tabblad Apps en apparaten** van de **Instellingenpagina** in uw Glooko®-account.
2. Download de app voor Mac/PC en volg de installatie-instructies.
- 3a. Start Glooko Uploader® door te dubbelklikken op het pictogram op uw pc.
- b. Meld u aan op uw Glooko®-account.
- c. Nadat u de kabel op de computer hebt aangesloten, sluit u het diabetesapparaat aan op de kabel. Glooko Uploader® gaat automatisch op zoek naar het apparaat.
- d. Daarna start de overdracht van gegevens naar Glooko®.
- e. Zodra de upload klaar is, laat Glooko® Uploader u dit weten.

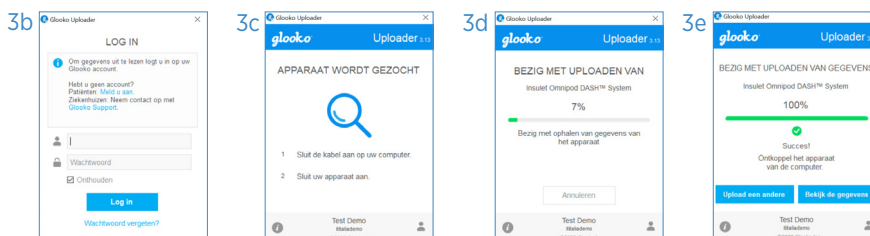

Meer informatie is terug te vinden op support.glooko.com

glooko®
BETTER TOGETHER

MKTG-0119-NL-n103