



Health Care  
Doctor  
Hospital  
Pharmacist  
Nurse  
Dentist  
First Aid  
Surgeon  
Etc.

# ASSEGNAZIONE DEI DISPOSITIVI NELLA PIATTAFORMA GLOOKO®

In Glooko®, quando i dati del dispositivo di un paziente vengono scaricati in clinica, **prima di poter visualizzare tali dati, è necessario assegnare al paziente il dispositivo scaricato**. I dati dei dispositivi che non sono assegnati ad un account saranno cancellati dopo 24 ore dal momento dello scarico.


Tuttavia, quando un paziente scarica i dati da casa sul proprio account, già collegato ad una clinica, i dati saranno visibili alla clinica direttamente dal profilo del paziente e senza il bisogno di ulteriori azioni.

## Come assegnare i dispositivi in Glooko®

- 1 Cliccare sulla scheda **Assegna dispositivi** per visualizzare un elenco di tutti i dispositivi scaricati nelle ultime 24 ore.


Qui, c'è la possibilità di filtrare per **numero di serie del terminale** (Transmitter) o per **tipo di dispositivo** (CGM, Glucometro, Microinfusore o Penna per insulina).

- 2 Nella **sezione Non assegnato** è possibile visualizzare tutti i dispositivi in attesa di essere assegnati ad un account paziente. Glooko cerca di associare questi dispositivi ad un paziente in base al numero di serie del dispositivo. I dispositivi precedentemente scaricati in clinica appariranno con il suggerimento di un possibile paziente a cui associare il dispositivo stesso.

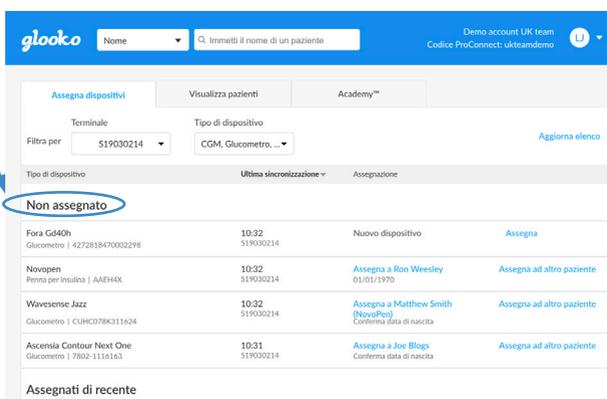

Tipo di dispositivo	Ultima sincronizzazione	Assegnazione
<b>Non assegnato</b>		
Fara G40h Glucometro   4272818470002298	10:32 519030214	Nuovo dispositivo <a href="#">Assegna</a>
Novopen Penna per insulina   AAEH4X	10:32 519030214	<a href="#">Assegna a Ron Weesley</a> 01/01/1970 <a href="#">Assegna ad altro paziente</a>
Wawesense Jazz Glucometro   CUHC078K311624	10:32 519030214	<a href="#">Assegna a Matthew Smith</a> (NovoPac) <a href="#">Assegna ad altro paziente</a> Conferma data di nascita
Ascensia Contour Next One Glucometro   7802-1116163	10:31 519030214	<a href="#">Assegna a Joe Blogs</a> Conferma data di nascita <a href="#">Assegna ad altro paziente</a>

- 3 Individuare il dispositivo che si desidera assegnare e procedere con l'assegnazione. Di seguito sono riportati gli scenari più comuni:

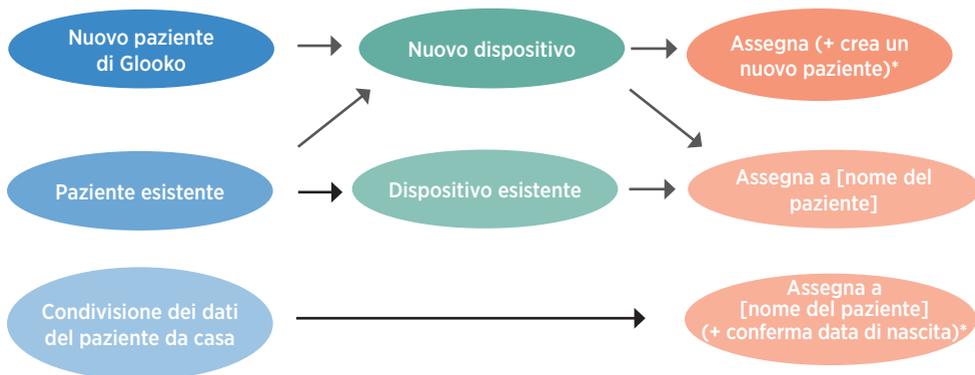


\*se è la prima volta che il paziente effettua uno scarico in clinica

## Trovare o creare un account paziente in Glooko®

### 1 Se non viene trovata una corrispondenza:

Il dispositivo sarà contrassegnato come **Nuovo Dispositivo**, e si avrà l'opzione **Assegna**. Dopo aver cliccato su **Assegna**, verrà richiesto di cercare un account paziente esistente o di crearne uno nuovo.

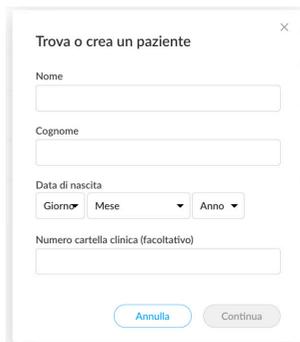

Trova o crea un paziente

Nome

Cognome

Data di nascita

Giorno ▼ Mese ▼ Anno ▼

Numero cartella clinica (facoltativo)

Annulla Continua

### 2 Se viene trovata una corrispondenza: Sarà disponibile l'opzione **Assegna a [Nome paziente]**. Cliccando su **Assegna a [Nome paziente]** i dati vengono assegnati a quel paziente senza ulteriori azioni.

Se invece si desidera cambiare il paziente assegnato al dispositivo cliccare su **Assegna ad altro paziente**, e verrà richiesto di cercare un account paziente esistente o di crearne uno nuovo.

### 3 Una volta che un dispositivo è stato assegnato, passerà da **Non assegnato** ad **Assegnato di recente** ed è possibile accedere ai dati del paziente cliccando sul nome del paziente. Un dispositivo rimarrà come **"Assegnati di recente"** per 24 ore, dopodiché verrà automaticamente rimosso dall'elenco, e i dati verranno salvati definitivamente nell'account a cui è stato assegnato.

Non assegnato			
Fora Gd40h Glucometro   4272818470002298	10:32 S19030214	Nuovo dispositivo	<a href="#">Assegna</a>
Novopen Penna per insulina   AAEH4X	10:32 S19030214	<a href="#">Assegna a Ron Weesley</a> 01/01/1970	<a href="#">Assegna ad altro paziente</a>
Wavesense Jazz Glucometro   CUHC078K311624	10:32 S19030214	<a href="#">Assegna a Matthew Smith (NovoPen)</a> Conferma data di nascita	<a href="#">Assegna ad altro paziente</a>
Ascensia Contour Next One Glucometro   78021216143	10:31 S19030214	<a href="#">Assegna a Joe Blogs</a> Conferma data di nascita	<a href="#">Assegna ad altro paziente</a>
<b>Assegnati di recente</b>			

### 4 La prossima volta che il paziente effettuerà lo scarico dallo stesso dispositivo, sarà possibile assegnare direttamente lo scarico a (Nome del paziente).

## Come attivare la condivisione dei dati da parte degli account paziente in Glooko®

Nella scheda Visualizza pazienti, è possibile invitare i pazienti esistenti ad attivare la condivisione dei dati del proprio account. Attraverso tale modalità, per la clinica, sarà possibile visualizzare i dati caricati dal paziente da casa.

Il paziente può essere **invitato** o gli può essere mandato un promemoria (**Invia nuovamente l'invito**) in un'occasione successiva nella scheda "Visualizza pazienti" con un solo clic.

Assegna dispositivi	Visualizza pazienti	Academy™	Crea account paziente
Filtra pazienti ▼	Ultima sincronizzazione ▼	Contrassegni	
Paziente ▼			
Liv Waddle 17/08/2009   Attivato	180+ giorni fa	+	
Ron Weesley 01/01/1970   Attivato	180+ giorni fa	<input checked="" type="checkbox"/> Hcl	
Lukas Meier 03/09/1959	180+ giorni fa	+	<b>Invia nuovamente l'invito</b>

È anche possibile **invitare** un paziente a condividere i dati del proprio account digitando la sua e-mail nel modulo all'inizio della creazione dell'account.

**Crea un account paziente**

Creare un nuovo account paziente per sincronizzare i dati con l'ospedale e collegarli mediante ProConnect.

Nome

Cognome

Data di nascita  
Giorno  / Mese  / Anno

Indirizzo e-mail (facoltativo)

Inserisci l'e-mail del paziente per invitarlo a utilizzare Glooko da casa.

Numero cartella clinica (facoltativo)

Numero di telefono (facoltativo)

Codice postale (facoltativo)

Tipo di diabete (facoltativo)  
Seleziona...

Sesso (facoltativo)  
Seleziona...



Produttore legale  
Glooko Inc.  
411 High Street  
Palo Alto, CA 94041  
Stati Uniti

Rapp. CE  
Glooko AB  
Nelliekvägen 20  
SE 412 63 Göteborg  
Svezia

**glooko**®  
BETTER TOGETHER