



Protocolo de lavado a mano

Modelo: HKB

V-HKB-IKON-PROTOCOLO-LAVADO-240125-ES

Índice

04 Introducción

04 Material para lavado a mano

04 Preparación de la mezcla

05 Lavado y aclarado

06 Escurrido

08 Secado

1. Introducción

Las bandas Ikon e Ikon Sleep están fabricadas en tela lo que permite su lavado y su desinfección con las toallitas preimpregnadas para la desinfección de superficies recomendadas por el fabricante.

2. Material para el lavado a mano

- Barreño
- Percha
- Toalla
- **Jabón:** se aconseja el uso de jabón neutro recomendado por el fabricante. La utilización de cualquier otro producto podría deteriorar el funcionamiento del equipo y afectar a la señal obtenida.

3. Preparación de la mezcla

Llenar con agua fría un barreño de tamaño suficiente para poder lavar la banda.

NO usar agua caliente. Añadir entre 25ml del jabón recomendado y mezclar con la mano o **un utensilio NO metálico.**



4. Lavado y aclarado

1. Introducir la banda en el barreño
2. Frotar suavemente con las yemas de los dedos las zonas que presenten suciedad.
3. Frotar con especial suavidad la zona de los sensores y siempre, en la dirección del bordado para sin ejercer presión.
4. Una vez terminado el lavado, aclarar la banda con agua limpia y fría, apretando ligeramente y frotado suave para eliminar los restos de jabón que pudieran quedar en el textil.
5. Prestar especial atención a las zonas de mayor espesor: zona de los sensores centrales y de las orejas y, sobre todo, a la zona del conector del amplificador. Retirar en la mayor medida posible el jabón de estas zonas, aclarando y presionando con la mano hasta que deje de salir espuma al hacerlo.




5. Ecurrido

1. Una vez aclarada la banda, colgarla en posición vertical con la zona del conector en la parte de arriba.
2. Apretar ligeramente con la palma de la mano comenzando desde arriba hacia abajo para desalojar el agua por la parte inferior.




-
3. Colocar la banda sobre la toalla y envolverla sobre ella misma.

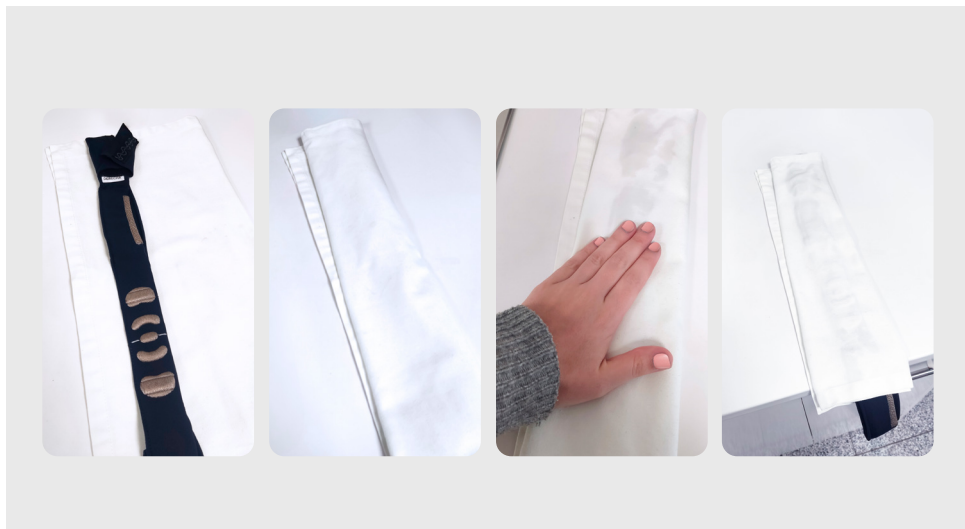

4. Realizar suaves movimientos de presión de la toalla sobre la banda para que absorba la mayor cantidad de agua posible.

6. Secado

1. Una vez retirado el exceso de agua, dejar la banda colgada de una percha por el extremo de la etiqueta de la banda para preservar la función de los sensores y del conector.
2. Dejar los velcros abiertos para que la zona del conector seque adecuadamente.

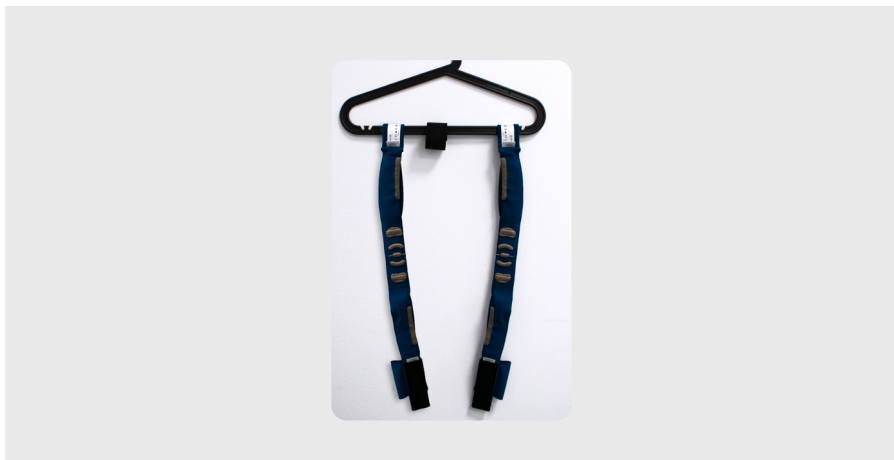

El tiempo de secado varía según la estación del año. Para asegurar un buen funcionamiento, en verano el secado se realiza en 48h, pero en invierno se recomienda dejar hasta 4 días de secado.

Cuando la banda está húmeda la impedancia de los sensores no se pone en verde.

Real-world research and applications



Europa

Zaragoza, España

C. Sta Teresa de Jesús, 32, 50006
Zaragoza
+34 931 444 823



Más información en:

Email

info@bitbrain.com

Help Center

help.bitbrain.com
