



Staven levereras i 5 delar.

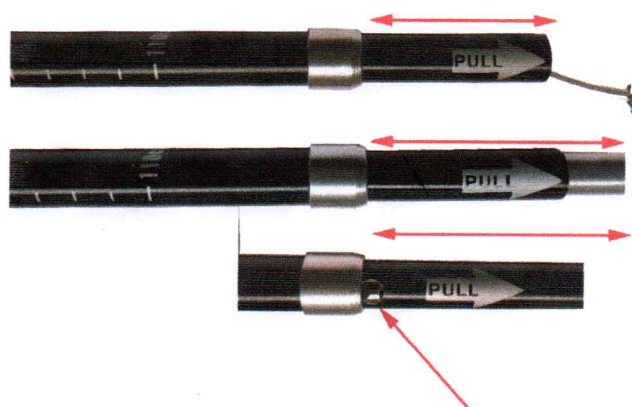

När du skall dra ihop delarna. I den övre delen (handtaget) finns det ett rör som drar ut och spänner de övriga stavdelarna. Dra försiktigt ut röret märkt "PULL" och du ser att stavdelarna spänns. Fortsätt tills du ser "PULL" igen dra lite kraftigare och du låser röret med en kula.

Du måste låsa röret med en lite kula som spänner hela konstruktionen.

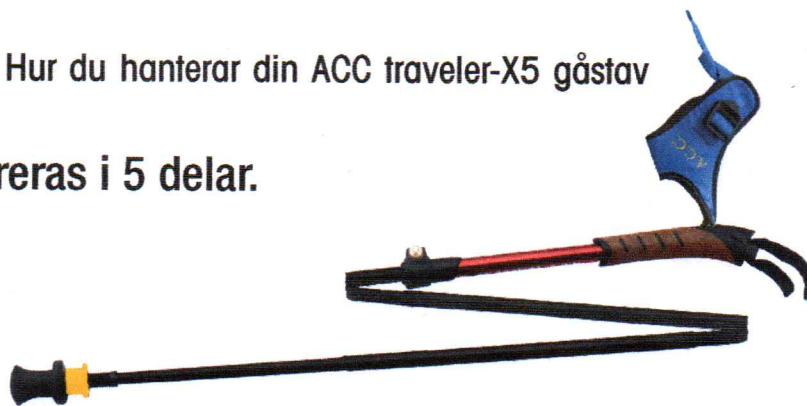

Med övre delen handtaget justerar du stavlängden.



Om staven sjunker ner under gång justera åtdragning/spänning på låset.



Undvik att dra isär delarna för långt. Det kan orsaka onödig slitage på wiren

Om du önskar mer information om hur du ställer in din stav på rätt längd kontakta oss gärna på telefon 0340-653700.