

STEP BY STEP

CLEAN&SEAL® offre un trattamento subgingivale bifasico, nella terapia delle tasche parodontali e peri-implantari infette.

CLEAN: FASE 1 – CON A²H



A²H deve essere **raffreddato per la conservazione.**




Non sciacquare con prodotti contenenti CHX, prima, durante e dopo il trattamento (CHX = clorexidina).

1 MISCELAZIONE SIRINGHE



- Per la preparazione del gel detergente con i componenti delle due siringhe, far riferimento alle informazioni contenute nel foglietto illustrativo e alle indicazioni sulla confezione del prodotto.

2 INSTILLARE

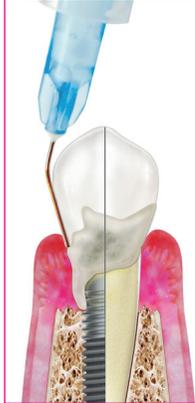

- Riempire le tasche da trattare con gel detergente.
- Evitare di eccedere nella quantità.

3 A²H

- Lasciare il gel detergente **> 60 sec** nella tasca.



4 SCALING MECCANICO



- Accurata strumentazione della tasca e della superficie radicolare. Rimuovere il tessuto di granulazione con una pinzetta.

5 SCIACQUARE



- Dopo la pulizia meccanica, sciacquare la tasca con soluzione salina (NaCl) fino a togliere i residui visibili di biofilm.



6 CICLO DI PULIZIA AGGIUNTIVO



- Riempire nuovamente la tasca con A²H fino a quando i residui di biofilm sono stati eliminati dalla tasca durante il passaggio 5.
- Eseguire una ulteriore strumentazione.
- Per le tasche parodontali, l'applicazione di 3-4 cicli è comune. Per le tasche peri-implantari, è consuetudine fare 4-7 cicli.

7 SCIACQUARE



- Sciacquare accuratamente la tasca solo con soluzione salina (NaCl) al fine di rimuovere eventuali residui di A²H.





STEP BY STEP

SEAL: FASE 2 – CON ACIDO IALURONICO RETICOLATO (xHyA)

1

PREPARAZIONE



- > La preparazione di xHyA viene eseguita secondo il foglietto illustrativo allegato.
- > Utilizzare un ago smussato, es 27G 0.4 mm x 20 mm

2 SIGILLARE LA TASCA



- > Riempire la tasca da apicale a coronale con xHyA.



Dopo il trattamento, il paziente **non deve mangiare o bere nulla per due ore**, in modo che xHyA possa iniziare il processo di guarigione.



Non utilizzare **colluttori** di clorexidina fino a due giorni dopo il trattamento.

Durante la prima settimana dopo il trattamento **CLEAN&SEAL®** il paziente deve **astenersi dallo spazzolare i denti e dall'usare lo spazzolino interprossimale.**



3 RICHIAMO

- > Se possibile, eseguire un nuovo riempimento della tasca con xHyA al richiamo dopo qualche giorno.



4 ULTERIORE VALUTAZIONE

- > Coinvolgere il paziente in controlli regolari. Ad esempio, programmare un follow up con il paziente a **3 e 6 settimane** per valutare la guarigione.

Seguire le raccomandazioni della European Federation for Periodontology (EFP) e astenersi dal misurare la tasca durante i primi 3 mesi.



PATIENT RECALL

Dopo circa **12 settimane**, la situazione clinica deve essere valutata per verificare l'andamento dei parametri clinici (BOP, CAL, PD).